

NOCOSPRAY Tagubilin sa Paggamit



Basahing mabuti ang buong user manual na nakasaad sa Nocospray roboten.



- 1** Gumamit ng gloves at proteksyon sa mata kapag humahawak ng mga ikidong disinfectant



- 2** Kalkulahin ang dami ng kwarto at pasiguraduhin ang bote na naglalaman ng sapat na dami ng solusyon, at tandaan ang antas. Surin at



- 3** I-screw ang spray nozzle sa bote. Ingatan ang takip nito.



- 4** I-click ang spray nozzle kung saan nakakabit ang bote sa Nocospray robot. Surin na ang nozzle ay nakalagay



- 5** Ilagay ang Nocospray robot sa isang solidong ibabaw. Pumili ng sulok para sa pinaka-mainam na epekto.



Nocolyse One Shot: dami ng kwarto (m³) x3
Nocolyse Neutral: dami ng kwarto (m³) x1

- 6** Itakda ang tamang volume ng kwarto. Ang setting ay depende sa laki ng silid at sa uri ng chemistry na ginamit.



- 7** Pindutin ang pindutan sa gitna ng dial ng numero. Kapag nag-beep ang robot sa loob ng 15 segundo, ito ay automatic na magsisimula.

Lumisan sa kwarto!



Nocolyse One Shot: **2 Oras** contact time
Nocolyse Neutral: **30 Minuto** contact time

- 8** Panatiliing nakasara ang pinto habang bumubuga sa buong kwarto. Magkabit ng plaka na nagsasabing babala tulad ng "Bawal Pumasok!"



- 9** luwi ang bote. I-screw muli ang takip. Banlawan ang spray nozzle at hose sa pamamagitan ng tubig. I-click muli ang nozzle at ibalik sa lugar ng robot.